



• Hoven förbereds genom att man fasar hovens kant runt tån, bak mot lamellranden, för att göra plats för Imprint Sport-skons kant. Hovens nedre del rasas och mjukt horn avlägsnas från trakt till trakt och upp för kanten.

1. • Hovens rengörs noggrant med desinfektionsvätska.
• 3 jämnt fördelade ovala skåror görs, 10x8 mm, till ett säkert djup, med hjälp av en speedborr på var sida av hoven. Se till att de hamnar inom skons kant. Skåror fungerar som nyckelpunkter och behövs för att hålla skon på plats.

2. • Imprint Sport-skön placeras med marksidan uppåt i en behållare på stödet. Undvik kontakt med behållarens botten så att den inte fastnar.
• Kokande vatten (100° C) hälls i behållaren upp till Imprint-skons vita kant. Om man mjukar upp och manipulerar skons skoyta kan skon försvagas.
• Skön värms upp tills kanten är genomskinlig och formbar och har en gummiliknande konsistens, ungefär i 2 minuter.

3. • Använd latexhandskar för att skydda händerna.
• Medan skon fortfarande värms upp appliceras ett tunt lager Imprint Structural Adhesive på den yttre nedre hovväggen från trakt till trakt och upp så långt kanten går.
• Hoven kan nu sättas ner på marken.

4. • När kanten är mjuk blir den genomskinlig vilket indikerar att den är formbar och redo att applicera.
• Skön tas snabbt och försiktigt ur det varma vattnet genom att man håller i strålpattan.
• Skostödet tas bort från skon, men försiktigt så att inte kanten deformeras (inåt).

5. • Skön placeras mitt på hoven, med skons tå i linje med hovväggen, inte framför. Trakterna ska vara parallella med hoven, strålen ska ha kontakt och hovens undersida ska ha fritt utrymme.
• Hoven och skon kupas i händerna och fingrarna trycks lätt över skokanten. Se till att det blir ett jämnt och förenat fäste mellan hovväggen och skokanten.
• Imprint Sport-skons kant får inte sträckas upp längs hovväggen eftersom det påverkar skons fäste.

6. • Plasten trycks lätt in i skåror med fingrarna samtidigt som man fortsätter att släta ut skons kant.
• Alla skåror ska kontrolleras så att de är fyllda med plast från skokanten och inte bara fästningsmaterial – ledfunktionen är viktig för att skon ska hållas på plats (se foto med genomskärning av hoven).
• Strålkontakt bör kontrolleras och plast formas om nödvändigt.
• Se till att det inte finns något mellanrum mellan kanten och hovväggen.
• Skons trakter passas ihop med hovens trakter innan skon stelnar.

Att applicera Imprint Sport-skön




- Genomskäring av hovens mitt visar följande:
 - "Led-fästning" mellan plast och horn.
 - Den nedre starka skokanten förs ihop med hoven, vilket bibehåller de ursprungliga hovdimensionerna.

- 7
 - Sulans vinkel på 10° ger ett mellanrum.
 - Den vita, övre, formbara termoplasten mjuknar vid 65° C.
 - Nedre grafitfärgade, tåliga och rörliga fåran.
- 8
 - Kontrollera att mellanrummet vid tån är tillräckligt stort.
 - När man är nöjd med hur skon ligger och är passad kan den fästas.
 - Skons alla ytor sprayas med Imprint Shoe Freezer, men se till att inte spraya några känsliga delar av hoven.
 - Kontrollera att skon är hård och vit innan hästen får stödja på den.

- 9
- Kontrollera att fästet mellan skons kant och hovväggen är helt och inte innehåller några håligheter eller rör sig.
- En tunn droppe Imprint Structural Adhesive dras längs den övre delen av skons kant och slätas ut med fingret för att garantera förseglingen.
- Låt hästen stå i minst 10 minuter eller tills fästningsmaterialet har stelnat
- Nu är skon på.

Att ta av Imprint Sport-skön

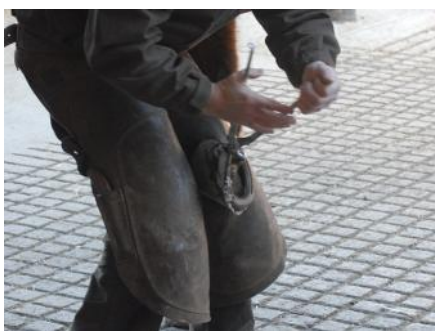

- Kanten raspas ner till hornet och skalas av från trakterna med hjälp av verktyg.
- Alternativt kan verktyg användas försiktigt för att ta bort kanten snabbare. Se till att skon har lossnat helt innan den dras av för att inte skada hoven.

Användbara tips

- Se till att kanten har formats och fästs väl till hovväggen.
- Förändringar och modifieringar av skon kan göras med varmluftspistol.
- När skon fästs till asymmetriska eller skadade hovar, eller om hornet är bristfälligt eller om det behövs extra styrka i ett visst område kan extra fästningsmaterial och uppvärmd Imprint Granules läggas till innan Imprint Sport-skön fästs.
- För att gradera eller lyfta skon kan uppvärmd Imprint Granules formas och gjutas fast till den uppvärmda hovytan och kanten av Imprint Sport-skön för att få önskad effekt.
- För att få extra bra grepp på isiga underlag kan tungstenbroddar användas i skons båda trakter.
- Imprint Sport rekommenderar hexagonala broddar. Men om fyrkantiga broddar föredras (11 mm) måste en 14 mm packning placeras mellan skon och brodden.

© Copyright 2008 Andrew Poynton FWCF

Adviceline: +44 (0) 1666 822953

Imprint Equine Foot Care

Town Forge, High Street, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9AT, UK.

IMPRINT **SPORT**